

VORSORGE & PRÄVENTION
MEDIZINISCHE VERSORGUNG
TRAINING & AUSBILDUNG



MED X5 [®]

DEFIBRILLATOREN RETTEN LEBEN!
Jeder kann es! Jeder darf es!

HELFFEN SIE MIT, EIN HERZSICHERES UMFELD ZU SCHAFFEN!

**VORSORGE, PRÄVENTION,
GESUNDHEIT,
MOTIVATION,
NOTFALLVERSORGUNG,
AUSBILDUNG, TRAINING**

MED X5

Eine kurze Geschichte, wie sie die Ihre sein könnte:

Ein zweifacher Vater (32) bei der Geburtstagsfeier seines kleinen Sohnes mit Familie und Freunden ...

... Auch der Nachbar (56) ist eingeladen. Dieser hatte zwei Jahre zuvor einen Herzinfarkt überlebt.

Ihm wurde ein Bypass und Stents gesetzt. Dessen Kinder schenkten ihm zu Weihnachten einen Defibrillator für ein herzsicheres Zuhause. Das Gerät wurde – jederzeit greifbar – im Eingangsbereich des Nachbarn deponiert. Des weiteren absolvierten die Familienmitglieder gemeinsam einen Herz-Lungen-Wiederbelebungs-kurs (HLW-Online).

... Größte Aufregung sollte die gemütliche Runde jäh unterbrechen.

Papa bricht plötzlich im Garten zusammen und bleibt leblos am Boden liegen! Allgemeine Hektik, Hilfeschreie, Angst und auch Hilflosigkeit in der Familie und im Freundeskreis beherrschen die Szene.

Nur einer bleibt ruhig, handelt souverän und sofort: der Nachbar. Er springt über den Gartenzaun, holt schnell seinen Defi herbei und beginnt mit dem Wiederbeleben des jungen Mannes.

Nach 4 Schocks aus dem Defi war der 32-Jährige ins Leben zurückgeholt und kann nun,
Dank seinem Retter, gesund weiterleben.

Diese Geschichte ist keine fiktive, sondern eine wahre. Sie handelt von exakt dem jungen Mann,
dessen Auge Sie auf dem Titelblatt dieser Info-Broschüre anblickt.

VORWORT

Helfer schützen, Leben retten, Werte wahren – diesen Leitsätzen folgen die Mitarbeiter der Firma MedX5. Seit mehr als zwei Jahrzehnten bin ich in der Notfallmedizin tätig, leitete unter anderem Firmen wie Laerdal Medical, CNSystems, HeartSine Technologies und war viele Jahre als Berater und Kontaktadresse für die American Heart Association in Europa tätig.

Ende 1990 kam ich das erste Mal mit sogenannten Ersthelfer-Defibrillatoren (Defi, AED) des Herstellers Heartstart (heute Philips) in Kontakt. Sofort erkannte ich das enorme Potenzial dieser Geräte. Zu einer Zeit, in der nicht einmal jeder Rettungswagen über einen „Defi“ verfügte, wurde es möglich, dass auch Laien bei einem Herzstillstand lebensrettende Maßnahmen ergreifen konnten.

Als Laerdal-Geschäftsführer startete ich 2001 gemeinsam mit der Björn Steiger Stiftung die Kampagne „Kampf dem plötzlichen Herztod“. Seit dieser Zeit wurden zehntausende der kleinen, selbsterklärenden Lebensretter in Gemeinden, Praxen, Hotels, Fitness Centern, Schulen und Unternehmen installiert. Trotz Widerständen von Hilfsorganisationen und Medizinern haben wir als weltweit erstes Unternehmen im Jahre 2007 Defibrillatoren in Supermärkten angeboten, denn schließlich sterben 82 Prozent aller Opfer zuhause und am Arbeitsplatz. Der Erfolg gab uns Recht, und es ist nach wie vor unser Ziel, das Netz der Defi-Standorte so engmaschig zu verknüpfen, dass sich jeder einzelne Bürger überall und jederzeit herzsicher fühlen kann.

Auf Basis des Task Force Monitors der CNSystems AG entwickelten wir 2003 den mit dem Innovationspreis gekrönten „MedX5 Check-Up“, ein Risiko-Screening, um Gefahren frühzeitig zu erkennen, die zum plötzlichen Herztod führen können. Diese Gesundheitsvorsorge wird ständig ausgebaut und schafft optimale Synergieeffekte mit der medizinischen Versorgung. Ausbildung und Training von Ersthelfern bilden das dritte Standbein unserer Firma und komplettieren somit das Angebot.

Das neueste Projekt ist die Gründung der **Citizens Save Lives Association** (Bürger retten Leben), die sich u. a. um eine internationale Defi-Standortregistrierung inklusive geschulter Ersthelfer kümmert. Die weltweiten Geschäftsbeziehungen und Kontakte zu Organisationen machen dies möglich.

Für dieses Projekt stehe ich mit meinem Namen, und es ist auch das erklärte Ziel meines Unternehmens.



RISIKEN ERKENNEN UND VORSORGEN

BLUTHOCHDRUCK
SCHLAFAPNOE
STRESS
PLÖTZLICHER HERZTOD
HERZINFARKT
BURN OUT
SCHLAFSTÖRUNG
LUNGENFUNKTION
SCHLAGANFALL

Wir bieten Gesundheitstage für Betriebe, Vereine, Firmen und andere Kundengruppen an. Egal, ob Sie eine Eventveranstaltung oder einen „Gesundheits-Tag“ wünschen, unser Angebot wird in Absprache mit Ihnen, dem Betriebsarzt oder aber entsprechend der Notwendigkeit und Zielsetzung erstellt.

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Die gegenwärtigen Entwicklungen stellen die Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen vor veränderte Herausforderungen.

Insbesondere der drohende Fachkräftemangel, die Gesunderhaltung der Mitarbeiter sowie eine altersgerechte Personalpolitik stellen personalorientierte Handlungsfelder immer mehr in den Fokus der Unternehmensstrategien.

Arbeitgeber müssen sich heute um die körperliche und geistige Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmern, wenn sie volle Leistung erwarten wollen. Erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement ist längst zu einem Wettbewerbsfaktor geworden. Dazu kommt, dass durch den demografischen Wandel immer weniger junge Fachkräfte nachkommen, während es gleichzeitig gilt, immer mehr ältere Arbeitnehmer bis zur Rente gesund zu erhalten.

Diese Entwicklung ist nichts Neues und viele Unternehmen haben bereits punktuell Maßnahmen ergriffen, doch leider tritt oft die erhoffte Wirkung nicht ein. Also stellt sich die Frage, wie implementiere ich ein ganzheitliches, erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement?

Und wie schaffe ich es, dies nachhaltig im Unternehmen zu verankern und dabei gleichzeitig einen langfristig messbaren Nutzen für meine Mitarbeiter und mein Unternehmen zu erzielen? Fragen, auf die unsere Experten nicht nur Antworten, sondern auch maßgeschneiderte Methoden und Lösungen für Sie parat haben.

Setzen Sie auf uns! Für uns zählen einzig und allein die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und der dadurch erzielte und messbare Mehrwert für Ihr Unternehmen!

MEDX5 GESUNDHEITS-SCREENING

EKG

NEU ohne Messzeitbegrenzung



BLUTDRUCKMESSUNG

NEU mit Speicherfunktion



MEDX5[®]



SAUERSTOFF & PULS


NEU auch mit Bluetooth-Funktion

**Wir bilden Sie aus zum zertifizierten
Gesundheits-Vorsorge-Manager**

Die eingesetzten medizinischen Geräte sind einfach zu bedienen,
selbsterklärend und auch für den privaten Gebrauch hervorragend geeignet.

shop.medx5.com

ALARMZEICHEN RICHTIG DEUTEN UND REAGIEREN

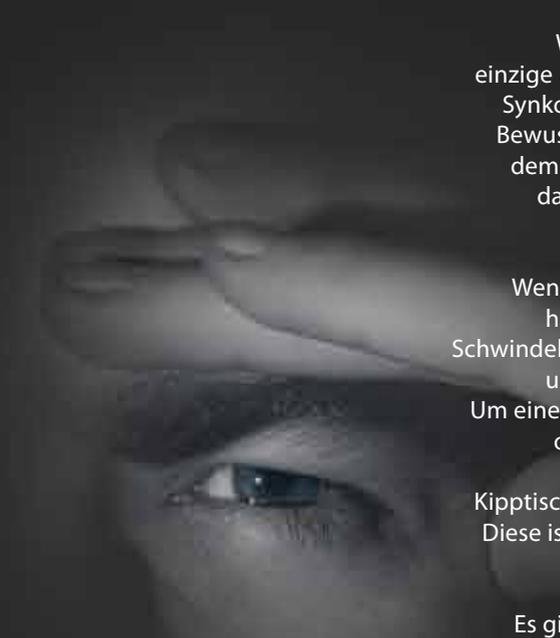

Wussten Sie schon, dass der einzige Unterschied zwischen einer Synkope (= plötzlich auftretende Bewusstlosigkeit, Schwindel) und dem plötzlichen Herztod der ist, dass man nach einer Synkope wieder aufwacht?

Wenn Sie dieses Erlebnis bereits hatten und Sie an ständigem Schwindel leiden, gehen Sie zum Arzt und lassen sich untersuchen. Um eine sogenannte orthostatische oder neurologische Ursache auszuschließen, ist eine Kipptischuntersuchung notwendig. Diese ist vollkommen risikolos und tut nicht weh!

Es gibt durchaus Anzeichen, die zum plötzlichen Tod führen können und behandelbar wären. Wir bieten unterschiedliche Screening-Methoden an, die gemeinsam mit unseren Partnern durchgeführt werden.

FAKTEN IM KAMPF GEGEN DEN PLÖTZLICHEN HERZTOD

ES KANN JEDEN TREFFEN!

Egal ob dick oder dünn, gesund oder krank, Raucher oder Nichtraucher, Sportler, Vegetarier, junge oder alte Personen. Ein höheres Risiko tragen selbstverständlich Personen mit Vorerkrankungen, wie z. B. Bluthochdruck, Diabetes oder aber Personen, die schon einen Herzinfarkt überlebt haben. Das Herz beginnt urplötzlich zu rasen und völlig unkoordiniert zu schlagen. Die Pumpleistung des Herzens sinkt, das Herz bleibt stehen – man stirbt innerhalb weniger Minuten.

FAKTEN

Über 82 Prozent aller Opfer, die dem plötzlichen Herztod erliegen, sterben zuhause, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. In Europa sterben daran jedes Jahr weit über 800.000 Menschen, in Deutschland sind es immer noch über 140.000 Opfer jährlich. Gründe: Trotz steigender Anzahl von Defibrillatoren weiß die Bevölkerung nicht, dass diese offen zugänglichen Geräte jeder einsetzen kann und auch darf. Die installierten Defibrillatoren (AED-Geräte) reichen jedoch in Bezug auf die Flächenverteilung bei weitem nicht aus, um die Reaktionszeit von unter 5 Minuten zu gewährleisten.

DEFIBRILLATOREN RETTEN LEBEN!

Ist das Opfer dann bewusstlos, ohne Atmung und Reaktion, muss so rasch wie möglich ein Defi eingesetzt und sofort mit der Herzdruckmassage begonnen werden. Nur dann hat die betroffene Person eine gute Überlebenschance.



Unsere Defibrillatoren (Schockboxen) sind wie alle anderen Geräte „kinderleicht“ zu bedienen, selbsterklärend und absolut sicher. Darüber hinaus bieten wir sogenannte Reanimations-Defibrillatoren an, die den Notfallhelfer auch während der Herzdruckmassage akustisch anleiten und unterstützen.

AN DEN KOSTEN DARF ES NICHT SCHEITERN!

Wir haben bereits vor Jahren den Anschaffungskosten den Kampf angesagt, denn hohe Gewinnmargen, Marketing- und Vertriebskosten dürfen nicht der Grund dafür sein, dass lebensrettende Geräte nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Simple Gerätebedienung, sichere Technologie und modernste Produktionsverfahren garantieren höchste Sicherheit und Effizienz wie auch ein absolut faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

WEITERE VORTEILE

Lange Garantiezeiten und wartungsfreie Systeme wie auch geringfügigster Material-Folgebedarf für Ersatzelektroden und Batterien sind Garantien für niedrigste Folgekosten.

Abgerundet wird unser Lieferangebot mit einer kostenfreien Standortregistrierung wie auch auf Wunsch mit einer kombinierten Gefahrenversicherung für max. 5 Jahre.

Wir unterstützen alle Bürgerinnen und Bürger wie auch Geschäftskunden bei Kauf, Miete sowie Leasing von lebensrettenden Defibrillatoren und weiterem Notfall-Equipment.

Detailinformationen zu unserem Defibrillatoren-Angebot und Zubehör finden Sie auf unserer Webseite www.medx5.com oder im Shop.

Beachten Sie bitte auch unsere Schulungsfilme in YouTube zum Einsatz und Gebrauch eines Defis (=AED).



LEBEN RETTEN IST SO EINFACH!

Im Notfall Ruhe bewahren! Opfer und sich selbst aus dem Gefahrenbereich bringen.

Person laut ansprechen, an den Schultern rütteln. Atmung kontrollieren.

Wenn keine Reaktion und keine Atmung, Notruf absetzen und nach Hilfe rufen.

Defibrillator holen lassen.

1



Sofort mit der Herzdruckmassage (HLW) beginnen! 30x drücken, 2x beatmen – ABER nur, wenn trainiert! Ansonsten nur HLW! Frequenz 110x/min.

2



Defi einschalten, Anweisungen befolgen! Sie können nichts verkehrt machen!

3




Ölige, nasse oder fettige Haut abtrocknen. Starke Brustbehaarung an den Klebstellen rasieren und bei Frauen Büstenhalter entfernen.

4




Folgen Sie einfach den Sprachanweisungen des Defis.

5

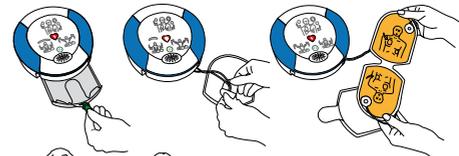

Korrekte Elektrodenplatzierung bei Erwachsenen.

6

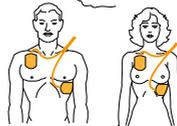

Auf Aufforderung SCHOCK-Taste drücken. Bei Defis mit automatischer Schockauslösung WARNUNG beachten!

7



Während der Schockabgabe Patienten nicht berühren!

8



Fahren Sie im Wechsel mit der Herzdruckmassage, dem Beatmen (wenn geübt) und dem Schocken fort, bis der Rettungsdienst eintrifft.

9



MEDX5

Diese Seite ist auch als Poster erhältlich.

Citizens
SAVE LIVES 

JEDER KANN LEBEN RETTEN! JEDER MUSS ES!

Der größte Fehler, den Sie machen können,
ist nichts tun!
Selbst wenn Ihr letzter Erste-Hilfe-Kurs Jahre
zurückliegt, ignorieren Sie bitte nicht die
Notlage und riskieren somit ein mögliches
Todesopfer. Es könnten genauso Ihre
eigenen Familienangehörigen, Freunde
oder Kollegen/innen die Betroffenen sein.
Sprechen Sie eine verunfallte Person an,
alarmieren Sie den Rettungsdienst und
fordern Sie anwesende Bürger zur
Mithilfe auf!
Bewahren Sie Ruhe! Sie können das!

Achten Sie auf vorhandene Defibrillatoren
an öffentlichen Plätzen, Firmen, Hotels,
Restaurants, Museen, Sportvereinen, etc.,
prägen Sie sich die Standorte ein und setzen
Sie die AED-Geräte (Defis) im Notfall ein!



Alle Geräte sind auch von Laien einsetzbar.
Keine Angst – niemand darf Laienhelfer zu
jedweder Haftung heranziehen.

Defibrillatoren-Standorte sind mit
grünen Hinweisschildern markiert.
Auch veraltete AED-Schilder weisen auf
einen Defi-Standort hin.

Helfen Sie mit und melden Sie vorhandene
Defibrillatoren-Standorte, so dass die mit
der Defi-Standort-Seite verlinkten APPs
stets auf dem neuesten Stand sind und
Risikopersonen immer wissen, wo sich ein
herzsicherer Standort befindet.



DEFIBRILLATOREN (SCHOCKBOXEN) VON HEARTSINE

Wählen Sie zwischen zwei Modellen:

dem **halbautomatischen SAM 350P**
(zur Schockauslösung wird eine Taste gedrückt)

PZN Nummer 11103329



oder
dem **vollautomatischen SAM 360P**
(Schockauslösung automatisch)

PZN Nummer 11103335

Gerätemerkmale:

- CE/FDA/ISO zertifiziert, Militär- und Luftfahrtzulassung
- Spritz- und Schwallwasserschutz IP56
- 8 Jahre Herstellergarantie (optional 4 Jahre mit Versicherung)
- kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder > 8 Jahren (optional erhältlich für Kleinkinder < 8 Jahren)
- HLW-Unterstützung mit Metronom
- inkl. Doppeltragesack mit Zubehör
- mit integriertem Datenspeicher, automatischem Selbsttest, akustischen & optischen Alarmen und lauten Schritt-für-Schritt-Sprachanweisungen

Der plötzliche Herztod ist der „Killer Nr. 1“ weltweit, gefolgt von Herzinfarkt und Schlaganfall!
Eine sehr große Anzahl der Opfer könnte überleben, wenn Risiken erkannt und die Ursachen behandelt werden.

HERZSICHER ZUHAUSE, PRIVAT, FREIZEIT



Wie alle anderen Defibrillatoren dieser Klasse sind beide Geräte kinderleicht zu bedienen, vollziehen und garantieren eine sichere und rasche Analyse und geben bei Bedarf einen Schock frei.

Beim SAM350 wird dieser durch das Drücken der aufleuchtenden Schocktaste ausgelöst. Der SAM 360 löst den Schock nach der Ansage: „...Der Schock wird in 3...2...1...ausgelöst!“ selbständig aus.

Anschließend wird der Helfer aufgefordert, mit der Herzdruckmassage zu beginnen, die das Gerät dann mit einem Signalton (Taktgeber) begleitet.

Der integrierte Speicher sichert die Daten für eine spätere Auswertung. Mit Hilfe eines optionalen Datenkabels können Software Updates kostenfrei durchgeführt werden.

Nach einem Einsatz und der Datenübermittlung an den Hersteller kann ein kostenloser Ersatz der PAD-PAK-Kassette in Verbindung mit dem Forward Hearts Programm (Free PAD-PAK) erfolgen. Details erhalten Sie auf unserer Webseite.

Mit der derzeit höchsten IP Rate (= Rating für Staub, Spritz- und Schwallwasserschutz) eignen sich die HeartSine-Geräte bestens für Outdoor-Einsätze und in Bereichen, die besonderen Bedingungen und hohen Anforderungen ausgesetzt sind – wie dies etwa in der Schifffahrt, an Küsten, in Feuchtgebieten, im Militär und Rettungsdienst oder bei der Polizei der Fall ist.



“SCHOCKEN” TUN ALLE DEFIBRILLATOREN! DER SAM 500P “REANIMIERT” UND DEFIBRILLIERT

Die Abgabe eines Elektroschocks wie auch das Handling sind kinderleicht!
Damit auch die Herzdruckmassage nicht zum Problem wird und der Patient beste Überlebenschancen bekommt, erhält der Anwender bei diesem Modell zusätzliche **Echtzeit-Informationen und -Anleitungen wie: „schneller/langsamer/fester drücken!“**



PZN Nummer 08839469

Gerätemerkmale:

- CE/FDA/ISO zertifiziert, Militär- und Luftfahrtzulassung
- Spritz- und Schwallwasserschutz IP56
- 8 Jahre Herstellergarantie (optional 4 Jahre mit Versicherung)
- kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder > 8 Jahren (optional erhältlich für Kleinkinder < 8 Jahren)
- HLW-Unterstützung mit Metronom und zusätzlicher Qualitätskontrolle
- inkl. Doppeltragesack mit Zubehör
- mit integriertem Datenspeicher, automatischem Selbsttest, akustischen & optischen Alarmen und lauten Schritt-für-Schritt-Sprachanweisungen

Der derzeit weltweit einzige Reanimations-Defibrillator ohne spezielles Zubehör
und mit Echtzeitkontrolle und -Anweisungen!

... FIRMA, HOTEL, VEREIN usw.

Die Abgabe eines elektrischen Schocks ist kinderleicht!
Der "Schock" ist allerdings nur eine der
Maßnahmen, um die Überlebenschancen eines
Opfers zu verbessern.
Nachdem der elektrische Schock abgegeben
wurde, sollte die Herzdruckmassage folgen.

Egal, ob Sie Laie oder Profiretter sind:
Über 70 Prozent aller Herzdruckmassagen
werden unzureichend durchgeführt!

WIR HABEN UNS DER HERAUSFORDERUNG GESTELLT!

Das SAM 500P-Gerät überwacht die
Durchführung der Herzdruckmassage – in Echtzeit.
Der Anwender erhält Informationen wie z. B.:
„schneller/langsamer/fester drücken!“
Sollten das Brustbein oder Rippen durch die
HLW-Maßnahme brechen, wird über die
Geräteansage und der patentierten
HeartSine-Technologie sichergestellt,
dass der für die Unterstützung des Herzens
notwendige „Druck“ aufrecht erhalten bleibt.

Eine gute und korrekt durchgeführte
Herz-Lungen-Wiederbelebung bedeutet für
das Opfer eine Begrenzung der möglichen
zerebralen Schäden und trägt somit
entscheidend zum Wiedererlangen der
vorherigen Lebensqualität bei.

Dem Retter wird unmittelbar während der
Hilfeleistung mitgeteilt, ob er seine Maßnahmen
ausreichend, effizient und erfolgreich durchführt.
Dies ist mit der Gerätesoftware und im
Leistungsspektrum des SAM 500P ohne
Zusatzkosten inbegriffen.

Leben retten ist nicht schwer!



... MACHEN SIE IHREN DEFIBRILLATOR ZUGÄNGLICH!

Egal, ob im Innen- oder Außenbereich
... der Defi sollte immer zugänglich sein.
Für alle und jeden!



Weitere Aufbewahrungssysteme mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen finden Sie in unserem Shop. Unsere Produkte werden in der EU und in Deutschland produziert und mit Herstellergarantie ausgeliefert.

MARKIEREN SIE IHREN STANDORT!

Informieren Sie Ihr Umfeld und die Nachbarschaft über Ihren herzsicheren Defi-Standort! Unterstützen Sie Bürgerinnen und Bürger, die Leben retten können.

OPFER UND HELFER DANKEN ES IHNEN!

Egal, ob im Innen- oder Außenbereich,
ein Defi hinter verschlossener Tür
kann niemandem helfen!

Sie haben sich entschieden, den
Kampf gegen den "Killer Nr. 1"
gemeinsam mit uns aufzunehmen?

TOLL!

Damit Bürgerinnen und Bürger über
Ihren herzsicheren Standort Kenntnis
erhalten, markieren Sie diesen!

Wir kümmern uns um die
Bekanntgabe auf der internationalen
Defi-Standort Webseite und der APP von
Citizens Save Lives
www.cisali.com

Sicherheit für Mitmenschen und
Werbung für Ihr Unternehmen.



www.cisali.com



ÜBUNG MACHT MEISTER! TRAINIEREN MACHT SPASS UND SCHAFFT SICHERHEIT!



Wir bieten neben der ersten Inbetriebnahme unterschiedlicher Defibrillatoren in Kombination mit der Durchführung der Herzdruckmassage oder der Herz-Lungen-Wiederbelebung selbstverständlich auch erweiterte Notfall- und Erste-Hilfe-Kurse an.

Ein ganz besonderer Fokus liegt im Training von Schülern und Studenten, denn je eher man Ängste verliert und Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert, desto höher ist die Chance, dass im Notfall geholfen wird.

Unser Ausbildungs- und Trainingsteam besteht aus Fachkräften mit pädagogischem Knowhow.

Beachten Sie bitte unsere exklusiven Kombinationsangebote mit Defi-Trainer und HLW-Übungspuppe! Optimal für Schulen, Vereine, Firmen und Ausbilder.

Wir verfügen über ein QM-Managementsystem und richten uns nach AHA-, ERC-, oder GRC-Richtlinien.

LITHIUM-AKKU BRÄNDE LÖSCHT MAN MIT LITH-EX!

Mit stetiger Zunahme von akkubetriebenen Haushaltsgeräten, Werkzeugen, Freizeitgeräten oder Motoren steigt das Risiko von Bränden, die mit herkömmlichen Feuerlöschgeräten nicht zu löschen sind. Lithium-Ionen-Brände bergen nicht nur durch die Freisetzung immenser Energie ein hohes Gefahrenrisiko, zudem können durch den Einsatz von Wasser-, Schaum-, oder CO₂-Löschgeräten explosionsartige Reaktionen hervorgerufen werden.

Das LITH-EX Feuerlöschspray enthält das Speziallöschmittel AVD (verflüssigtes Vermikulit) und wurde gezielt für Lithium-Akku Entstehungsbrände entwickelt.

AVD Löschmittel ist umweltfreundlich und wird mit Nitrogen (N₂) als Treibmittel aufgetragen.
Von der ZSW in Ulm und Apragraz (B) getestet und zugelassen.



WERDEN SIE EIN HELD! UND HELFEN SIE MIT, LEBEN SCHÜTZEN UND RETTEN!

Wir helfen Ihnen dabei!
Wir beraten, schulen und beliefern Sie mit unseren Produkten.

**Wir arbeiten ausschließlich mit trainierten, erfahrenen und zuverlässigen
Partnern und Dienstleistern zusammen.**

Autorisierter Partner von MedX5



Unser Team steht Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung!

+ 49 821 907 8000

info@medx5.com

MedX5 GmbH & Co. KG
Humboldtstr. 9 D-86316 Friedberg/Bayern